

RP CONEXÕES RESTAURADORAS LTDA

CNPJ: 08.539.206/0001-04

Endereço: Rua Danilo Valbuza, 333 – Laranjeiras – Caieiras – SP – CEP: 07747-300
Indústria Brasileira

Responsável Técnico: Jailson Jose da Silva – CREA: 5062551972

Telefone SAC: 11 4441-3854 / **E-mail:** engenharia@rpcomponentes.com.br

FINALIDADE E INDICAÇÃO DE USO

O FAST VIEW GRID RP é uma placa de localização para punção, radiopaca, estéril-descartável, perfeita para ser utilizada no mapeamento radiológico e no esboço do campo cirúrgico. Pode ser utilizada para preparação de procedimentos nas mãos, pés, joelhos, ombros, pescoço, crânio-buco-maxilar, coluna, ou em qualquer região do corpo humano em que a delimitação precisa de campo possa trazer benefícios para técnica cirúrgica. FAST VIEW GRID RP evita a exposição repetida do paciente, cirurgião e equipe ao raio-X, prevenindo desvios de acesso, e permitindo incisões menores.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Plástico grau médico (náilon não tecido)
- Tiras adesivas grau médico
- Tinta radiopaca grau médico

ESTERILIZAÇÃO

Esterilizado pelo processo de óxido de etileno.

Validade de 3 anos a partir da data de esterilização.

CONDIÇÕES PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Armazenar em temperatura entre 0°C e 50°C; Umidade relativa deve estar abaixo dos 80%; não colocar objetos pesados sobre a embalagem; evitar bater a embalagem ou amassar; manter o produto em local seco e ao abrigo do sol.

MODO DE USO

Com a ser aplicada no paciente previamente limpa:

1. Remova o verso da fita.
2. Coloque a FAST VIEW GRID RP voltada para baixo no paciente, sobre a área de interesse.
3. Escaneie a área de interesse.
4. Em cada corte da varredura, serão vistos doze pontos na superfície da pele.
5. Determine qual corte de varredura o radiologista deseja trabalhar.



6. Peça ao radiologista para determinar qual ponto é melhor representa o ponto de entrada no paciente.
7. Você notará que em cada corte de varredura há um espaço maior entre dois dos pontos. Esses dois pontos representam #1 e #2 na grade.
8. Uma vez que o ponto de referência para o ponto de entrada é escolhido, você precisará apenas contar de qualquer um lado na fatia de varredura para determinar qual número linha na grade que o ponto de referência representa.
9. Mova o paciente para a fatia de varredura pré-determinada.
10. Ligue a luz do laser e marque a área com uma caneta hidrográfica onde a luz atravessa a linha adequada.
11. Antes de remover a grade, marque um ponto de referência na cada cruz de canto da grade com uma caneta hidrográfica.
12. Remova a grade e inicie o procedimento desejado.

ADVERTÊNCIAS / PRECAUÇÕES

- O usuário, antes de utilizar o produto, deve ler atentamente as instruções de uso que o auxiliarão no uso correto e seguro, além de proteger contra possíveis riscos.
- Não utilize o produto fora da data de validade da esterilização, sempre verifique se a indicação de esterilização está correta.
- O produto só deve ser utilizado por profissionais médicos qualificado, que possuam o conhecimento e a experiência necessária para a devida utilização do produto, conhecimento de manuseio de produtos estéreis e, principalmente, da importância de se manter um ambiente totalmente estéril nas salas de cirurgia, onde o cuidado e precaução com cada detalhe são fundamentais para que não haja riscos de contaminações.
- O produto deve ser transportado e acondicionado sempre protegido contra todo tipo de umidade, sujeira e contato com substâncias inflamáveis, corrosivas, tóxicas ou explosivas.
- Verifique a integridade da embalagem antes de utilizar o produto, em caso de violação, NÃO UTILIZE, pois a garantia de sua esterilidade estará comprometida.