

RP CONEXÕES RESTAURADORAS LTDA**CNPJ:** 08.539.206/0001-04**Endereço:** Rua Danilo Valbuza, 333 – Laranjeiras – Caieiras – SP – CEP: 07747-300

Indústria Brasileira

Responsável Técnico: Jailson Jose da Silva – CREA: 5062551972**Telefone SAC:** 11 4441-3854 / **E-mail:** engenharia@rpcomponentes.com.br**PRODUTO ESTÉRIL – ESTERILIZAÇÃO POR ETO****PRODUTO DE USO ÚNICO – NÃO REUTILIZAR****PROIBIDO REPROCESSAR**

Consultar instruções de uso para utilização



Cuidado, consultar os documentos acompanhantes



Manter afastado de chuva



Manter afastado da luz solar



Não utilizar se a embalagem estiver danificada



Número de referência



Código do lote



Fabricante



Data de fabricação



Validade



Não reutilizar



Não reesterilizar

Esterilizado pelo método por Óxido de Etileno
Barreira única de esterilização**FINALIDADE E INDICAÇÃO DE USO**

O RP FREQUENCY é indicado para procedimentos de Bloqueio do Plexo e Nervos Periféricos, assim como Anestesia geral ou condutiva para realização de bloqueio neurolítico, Bloqueio anestésico de nervos

cranianos, Bloqueio anestésico de plexo celíaco, Bloqueio anestésico de plexos nervosos (lombossacro, braquial, cervical) para tratamento da dor), Bloqueio anestésico de simpático lombar, Bloqueio Foraminal, Bloqueio anestésico simpático, Bloqueio de articulação têmporomandibular, Bloqueio de gânglio estrelado com anestésico local, Bloqueio de gânglio estrelado com neurolítico, Bloqueio de nervo periférico, Bloqueio de nervo periférico – bloqueios anestésicos de nervos e estímulos neurovasculares, Bloqueio do sistema nervoso autônomo, Bloqueio facetário para-espinhoso, Bloqueio Fenólico, Alcoólico ou Com Toxina Botulínica – Por Segmento Corporal, Bloqueio neurolítico de nervos cranianos ou cervicotorácico, Bloqueio neurolítico do plexo celíaco, simpático lombar ou torácico, Extirpação de neuroma, Microneurólise intraneural ou intrafascicular de dois ou mais nervos, Microneurólise intraneural ou intrafascicular de um nervo, Microneurólises múltiplas, Microneurólise única, Neurectomia pré-sacral ou do nervo genitofemoral, Neurólise das síndromes compressivas, Punção articular diagnóstica ou terapêutica (infiltração) – Orientada ou não por método de imagem, Punção extra-articular diagnóstica ou terapêutica (infiltração/agulhamento a seco) – Orientada ou não por método de imagem, Radioscopia para acompanhamento de procedimento cirúrgico e Tratamento microcirúrgico das neuropatias compressivas, Denervação/rizotomia percutânea, com ou sem a utilização do recurso de neuromodulação com temperatura controlada e auxílio da estimulação percutânea elétrica para localização do alvo. Esses procedimentos podem ser realizados em conjunto, ou separadamente, a critério do médico. O grid de posicionamento permite correto e seguro posicionamento das cânulas. As cânulas podem ser posicionadas sendo guiadas por imagem ultrassom (ecogênica). O kit contempla também uma cânula extensora que facilita a injeção das substâncias conferindo um canal de trabalho que confere mais conforto, controle e precisão.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO / MECANISMO DE AÇÃO

Cada modelo comercial do RP FREQUENCY é composto por duas cânulas, um grid de posicionamento e uma cânula extensora.

As duas cânulas que compõem o RP FREQUENCY funcionam como cânulas para a inserção precisa de instrumentos (portal de trabalho) e permite neuromodulação dos nervos. Já o grid de posicionamento tem como função auxiliar no correto e seguro posicionamento das cânulas. Por fim, a cânula extensora facilita a injeção de substâncias anestésicas, analgésicas, viscosuplementares e antiartróticas.

FORMA DE APRESENTAÇÃO E MODELOS COMERCIAIS

O RP FREQUENCY é comercializado em condição estéril, em embalagem tipo blister de politereftalato de etileno – PET e selado com papel tipo Tyvek® (embalagem primária), contendo os seguintes modelos comerciais:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS
RPFR165005	RP FREQUENCY	Kit composto por: - 02 Cânulas: Dimensões de cada cânula: • Diâmetro de cada cânula do kit: 16 gauge • Comprimento de cada cânula do Kit: 50 mm • Ponta de cada cânula: 5 mm - 01 Grid de posicionamento: Dimensões: • 150 x 150 mm - 01 Cânula extensora: Dimensões: 150 mm
RPFR165010	RP FREQUENCY	Kit composto por: - 02 Cânulas: Dimensões de cada cânula: • Diâmetro de cada cânula do kit: 16 gauge • Comprimento de cada cânula do Kit: 50 mm • Ponta de cada cânula: 10 mm - 01 Grid de posicionamento: Dimensões: • 150 x 150 mm - 01 Cânula extensora: Dimensões: 150 mm
RPFR165015	RP FREQUENCY	Kit composto por: - 02 Cânulas: Dimensões de cada cânula: • Diâmetro de cada cânula do kit: 16 gauge • Comprimento de cada cânula do Kit: 50 mm • Ponta de cada cânula: 15 mm - 01 Grid de posicionamento: Dimensões: • 150 x 150 mm - 01 Cânula extensora: Dimensões: • 150 mm
RPFR1610005	RP FREQUENCY	Kit composto por: - 02 Cânulas: Dimensões de cada cânula: • Diâmetro de cada cânula do kit: 16 gauge • Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm • Ponta de cada cânula: 5 mm - 01 Grid de posicionamento: Dimensões: • 150 x 150 mm - 01 Cânula extensora: Dimensões: 150 mm
RPFR1610010	RP FREQUENCY	Kit composto por: - 02 Cânulas: Dimensões de cada cânula: • Diâmetro de cada cânula do kit: 16 gauge • Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm • Ponta de cada cânula: 10 mm - 01 Grid de posicionamento: Dimensões: • 150 x 150 mm - 01 Cânula extensora: Dimensões: 150 mm

RPFR1610015

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 16 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1612005

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 16 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 120 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1612010

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 16 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 120 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1612015

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 16 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 120 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1614010

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 16 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 140 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1614015

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 16 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 140 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1615005

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 16 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 150 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1615010

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 16 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 150 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1615015

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 16 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 150 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1620005

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 16 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 200 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1620010

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 16 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 200 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 16 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 200 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 18 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 50 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 18 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 50 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 18 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 50 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR185005

RP FREQUENCY

RPFR185010

RP FREQUENCY

RPFR185015

RP FREQUENCY

RPFR1810005

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 18 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1810010

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 18 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1810015

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 18 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1812005

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 18 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 120 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1812010

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 18 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 120 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1812015

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 18 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 120 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 18 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 140 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1814005

RP FREQUENCY

RPFR1814010

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 18 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 140 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1814015

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 18 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 140 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1815005

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 18 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 150 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1815010

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 18 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 150 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 18 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 150 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1815015

RP FREQUENCY

RPFR1820005

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 18 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 200 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 18 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 200 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1820010

RP FREQUENCY

RPFR1820015

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 18 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 200 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR205005

RP FREQUENCY
RPFR205005**Kit composto por:****- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 20 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 50 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

- 150 mm

RPFR205010

RP FREQUENCY
RPFR205010**Kit composto por:****- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 20 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 50 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

- 150 mm

RPFR205015

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 20 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 50 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2010005

RP FREQUENCY
RPFR2010005**Kit composto por:****- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 20 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

- 150 mm

RPFR2010010

RP FREQUENCY
RPFR2010010**Kit composto por:****- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 20 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

- 150 mm

RPFR2010015

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 20 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2012005

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 20 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 120 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2012010

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 20 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 120 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2012015

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 20 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 120 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2014005

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 20 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 140 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2014010

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 20 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 140 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

- 150 mm

RPFR2014015

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 20 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 140 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2015005RP FREQUENCY
RPFR2015005**Kit composto por:****- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 20 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 150 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2015010RP FREQUENCY
RPFR2015010**Kit composto por:****- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 20 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 150 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2015015

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 20 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 150 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2020005

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 20 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 200 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2020010

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 20 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 200 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2020015

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 20 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 200 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR215005

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 21 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 50 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR215010

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 21 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 50 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR215015

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 21 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 50 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2110005

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 21 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2110010

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 21 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2110015

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 21 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2112005

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 21 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 120 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2112010

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 21 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 120 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2112015

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 21 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 120 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2114005

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 21 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 140 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2114010

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 21 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 140 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2114015

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 21 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 140 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2115005

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 21 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 150 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2115010

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 21 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 150 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2115015

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 21 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 150 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2120005

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 21 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 200 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2120010

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 21 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 200 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2120015

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 21 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 200 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR225005

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 22 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 50 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR225010

RP FREQUENCY
RPFR225010**Kit composto por:****- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 22 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 50 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR225015

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 22 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 50 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

- 150 mm

RPFR2210005

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 22 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

- 150 mm

**RPFR2210010**
 RP FREQUENCY
 RPFR2210010
Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 22 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

- 150 mm

RPFR2210015

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 22 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2212005

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 22 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 120 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2212010

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 22 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 120 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2212015

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 22 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 120 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm



RPFR2214005

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 22 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 140 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2214010

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 22 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 140 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2214015

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 22 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 140 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2215005

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 22 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 150 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2215010

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 22 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 150 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2215015

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 22 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 150 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2220005

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 22 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 200 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2220010

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 22 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 200 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2220015

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 22 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 200 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR255005

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 25 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 50 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR255010

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 25 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 50 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR255015

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 25 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 50 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2510005

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 25 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2510010

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 25 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2510015

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 25 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2512005

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 25 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 120 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2512010

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 25 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 120 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2512015

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 25 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 120 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2514005

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 25 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 140 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2514010

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 25 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 140 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2514015

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 25 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 140 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2515005

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 25 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 150 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2515010

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 25 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 150 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2515015

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 25 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 150 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2520005

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 25 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 200 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2520010

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 25 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 200 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

Kit composto por:**- 02 Cânulas:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 25 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 200 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta ecogênica:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 16 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta ecogênica:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 16 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 140 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta ecogênica:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 16 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 140 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1610015RPE

RP FREQUENCY

RPFR1614010RPE

RP FREQUENCY

RPFR1614015RPE

RP FREQUENCY

RPFR1810005RPE

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta ecogênica:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 18 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1810010RPE

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta ecogênica:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 18 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1810015RPE

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta ecogênica:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 18 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1814005RPE

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta ecogênica:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 18 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 140 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1814010RPE

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta ecogênica:**

- Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 18 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 140 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1814015RPE

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta ecogênica:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 18 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 140 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta ecogênica:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 20 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta ecogênica:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 20 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta ecogênica:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 20 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta ecogênica:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 20 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 140 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2010005RPE

RP FREQUENCY

RPFR2010010RPE

RP FREQUENCY

RPFR2010015RPE

RP FREQUENCY

RPFR2014005RPE

RP FREQUENCY

RPFR2014010RPE

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta ecogênica:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 20 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 140 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2014015RPE

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta ecogênica:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 20 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 140 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR225005RPE

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta ecogênica:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 22 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 50 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR225010RPE

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta ecogênica:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 22 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 50 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2210005RPE

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta ecogênica:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 22 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2210010RPE

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta ecogênica:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 22 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2210015RPE

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta ecogênica:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 22 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2214005RPE

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta ecogênica:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 22 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 140 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2214010RPE

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta ecogênica:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 22 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 140 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2214015RPE

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta ecogênica:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 22 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 140 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR165005C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 16 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 50 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR165010C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 16 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 50 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR165015C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 16 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 50 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1610005C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 16 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1610010C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 16 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1610015C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 16 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 16 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 120 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 16 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 120 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 16 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 120 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 16 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 140 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1612010C

RP FREQUENCY

RPFR1612015C

RP FREQUENCY

RPFR1614010C

RP FREQUENCY

RPFR1614015C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 16 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 140 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 16 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 150 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1615005C

RP FREQUENCY

RPFR1615010C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 16 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 150 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 16 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 150 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1615015C

RP FREQUENCY

RPFR1620005C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 16 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 200 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1620010C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 16 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 200 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1620015C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 16 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 200 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR185005C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 18 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 50 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR185010C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 18 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 50 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR185015C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 18 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 50 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

**RPFR1810010C**

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 18 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1810015C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 18 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1812005C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 18 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 120 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1812010C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 18 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 120 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1812015C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 18 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 120 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1814005C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 18 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 140 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1814010C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 18 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 140 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1814015C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 18 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 140 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1815005C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 18 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 150 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1815010C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 18 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 150 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1815015C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 18 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 150 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1820005C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 18 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 200 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1820010C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 18 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 200 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1820015C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 18 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 200 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR205005C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 20 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 50 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR205010C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 20 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 50 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR205015C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 20 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 50 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2010005C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 20 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2010010C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 20 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2010015C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 20 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2012005C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 20 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 120 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2012010C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 20 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 120 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2012015C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 20 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 120 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2014005C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 20 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 140 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2014010C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 20 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 140 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2014015C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 20 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 140 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2015005C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 20 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 150 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2015010C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 20 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 150 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2015015C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 20 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 150 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2020005C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 20 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 200 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2020010C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 20 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 200 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2020015C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 20 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 200 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR215005C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 21 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 50 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR215010C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 21 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 50 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR215015C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 21 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 50 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2110005C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 21 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2110010C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 21 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2110015C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 21 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2112005C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 21 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 120 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2112010C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 21 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 120 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2112015C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 21 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 120 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 21 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 140 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2114005C

RP FREQUENCY

RPFR2114010C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 21 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 140 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 21 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 140 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2114015C

RP FREQUENCY

RPFR2115005C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 21 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 150 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2115010C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 21 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 150 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2115015C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 21 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 150 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2120005C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 21 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 200 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2120010C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 21 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 200 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2120015C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 21 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 200 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR225005C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 22 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 50 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR225010C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 22 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 50 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR225015C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 22 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 50 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2210005C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 22 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2210010C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 22 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2210015C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 22 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2212005C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 22 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 120 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2212010C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 22 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 120 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2212015C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 22 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 120 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2214005C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 22 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 140 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2214010C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 22 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 140 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2214015C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 22 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 140 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2215005C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 22 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 150 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2215010C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 22 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 150 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2215015C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 22 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 150 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2220005C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 22 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 200 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2220010C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 22 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 200 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2220015C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 22 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 200 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR255005C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 25 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 50 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR255010C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 25 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 50 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR255015C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 25 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 50 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2510005C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 25 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2510010C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 25 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2510015C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 25 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2512005C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 25 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 120 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm



RPFR2512010C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 25 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 120 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2512015C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 25 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 120 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2514005C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 25 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 140 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2514010C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 25 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 140 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2514015C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 25 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 140 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2515005C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 25 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 150 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2515010C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 25 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 150 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2515015C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 25 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 150 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2520005C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 25 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 200 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2520010C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 25 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 200 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2520015C

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas ponta curva:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 25 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 200 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1610010CPE

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas curvadas com ponta ecogênica:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 16 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1610015CPE

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas curvadas com ponta ecogênica:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 16 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1614010CPE

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas curvadas com ponta ecogênica:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 16 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 140 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1614015CPE

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas curvadas com ponta ecogênica:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 16 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 140 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1810005CPE

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas curvadas com ponta ecogênica:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 18 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

Kit composto por:**- 02 Cânulas curvadas com ponta ecogênica:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 18 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1810010CPE

RP FREQUENCY

RPFR1810015CPE

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas curvadas com ponta ecogênica:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 18 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

Kit composto por:**- 02 Cânulas curvadas com ponta ecogênica:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 18 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 140 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1814005CPE

RP FREQUENCY

RPFR1814010CPE

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas curvadas com ponta ecogênica:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 18 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 140 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1814015CPE

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas curvadas com ponta ecogênica:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 18 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 140 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

Kit composto por:**- 02 Cânulas curvadas com ponta ecogênica:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 20 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2010005CPE

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas curvadas com ponta ecogênica:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 20 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2010010CPE

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas curvadas com ponta ecogênica:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 20 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2010015CPE

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas curvadas com ponta ecogênica:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 20 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 140 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2014005CPE

RP FREQUENCY

RPFR2014010CPE

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas curvadas com ponta ecogênica:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 20 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 140 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2014015CPE

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas curvadas com ponta ecogênica:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 20 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 140 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR225005CPE

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas curvadas com ponta ecogênica:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 22 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 50 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR225010CPE

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas curvadas com ponta ecogênica:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 22 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 50 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2210005CPE

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas curvadas com ponta ecogênica:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 22 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

**RPFR2210010CPE**

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas curvadas com ponta ecogênica:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 22 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

Kit composto por:**- 02 Cânulas curvadas com ponta ecogênica:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 22 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2210015CPE

RP FREQUENCY

RPFR2214005CPE

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas curvadas com ponta ecogênica:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 22 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 140 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

Kit composto por:**- 02 Cânulas curvadas com ponta ecogênica:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 22 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 140 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR2214010CPE

RP FREQUENCY

RPFR2214015CPE

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas curvadas com ponta ecogênica:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 22 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 140 mm
- Ponta de cada cânula: 15 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1610005CF

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas curvadas com furo:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 16 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1610010CF

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas curvadas com furo:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 16 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1810005CF

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas curvadas com furo:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 18 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1810010CF

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas curvadas com furo:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 18 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1610005CFPE

RP FREQUENCY

Kit composto por:**- 02 Cânulas curvadas com furo com ponta ecogênica:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 16 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1610010CFPE RP FREQUENCY**Kit composto por:****- 02 Cânulas curvadas com furo com ponta ecogênica:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 16 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1810005CFPE RP FREQUENCY**Kit composto por:****- 02 Cânulas curvadas com furo com ponta ecogênica:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 18 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 5 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

RPFR1810010CFPE RP FREQUENCY**Kit composto por:****- 02 Cânulas curvadas com furo com ponta ecogênica:**

Dimensões de cada cânula:

- Diâmetro de cada cânula do kit: 18 gauge
- Comprimento de cada cânula do Kit: 100 mm
- Ponta de cada cânula: 10 mm

- 01 Grid de posicionamento:

Dimensões:

- 150 x 150 mm

- 01 Cânula extensora:

Dimensões:

150 mm

Para maior proteção do material, uma embalagem secundária de papel cartão acomodará a embalagem primária contendo o produto, a instrução de uso e 6 etiquetas de rastreabilidade.

ESTERILIZAÇÃO

Esterilizado pelo processo de óxido de etileno.

Validade de 3 anos a partir da data de esterilização.

CONDIÇÕES PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

O RP FREQUENCY deve ser armazenado em local ventilado e seco. O local de armazenamento deve ser afastado de janelas, expostos à luz solar ou próximo à aquecedores. Parâmetros indicados pelo fabricante para armazenamento e transporte do produto:

A. Faixa de temperatura ambiental: 15 °C ~ 30 °C

B. Umidade relativa: ≤80%

Por fim, o RP FREQUENCY deve ser armazenado e transportado sob condições as quais ele esteja protegido de umidade, sujidades e contato com substâncias corrosivas, tóxicas, inflamáveis ou explosivas.

Não colocar objetos pesados sobre a embalagem; evitar bater a embalagem ou amassar; manter o produto em local seco e ao abrigo do sol.

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO

O RP FREQUENCY só deve ser utilizado por profissionais capacitados.

Manter o produto em sua embalagem original até o momento do uso.

Evite queda, torção, esmagamento, impacto ou qualquer ação que venha danificar o produto, pois pode comprometer seu funcionamento.

Antes de utilizar o produto, a embalagem deve ser inspecionada quanto a sua integridade para garantir que o mesmo não foi comprometido. Não utilize o material caso a embalagem estiver danificada/violada.

Após a sua utilização, descartar o produto em lixo hospitalar, respeitando as leis vigentes para descarte de resíduos sólidos.

ADVERTÊNCIAS / PRECAUÇÕES

- O RP FREQUENCY é destinado para uso único, não reutilizar e não reprocessar.
- O RP FREQUENCY só pode ser usado de acordo com o seu propósito.
- O RP FREQUENCY usado deve ser descartado de acordo com a legislação vigente local.
- O usuário, antes de utilizar o produto, deve ler atentamente as instruções de uso que o auxiliarão no uso correto e seguro, além de proteger contra possíveis riscos.
- Não utilize o produto fora da data de validade, sempre verifique se a indicação de esterilização está correta.
- O produto só deve ser utilizado por profissionais médicos qualificados, que possuam o conhecimento e a experiência necessários para a devida utilização do produto, conhecimento de manuseio de produtos estéreis e, principalmente, da importância de se manter um ambiente totalmente estéril nas salas de cirurgia, onde o cuidado e precaução com cada detalhe são fundamentais para que não haja riscos de contaminação.
- O produto deve ser transportado e acondicionado sempre protegido contra todo tipo de umidade, sujeira e contato com substâncias inflamáveis, corrosivas, tóxicas ou explosivas.
- Verifique a integridade da embalagem antes de utilizar o produto, em caso de violação, NÃO UTILIZE, pois a garantia de sua esterilidade estará comprometida.

CONTRAINDICAÇÕES

O RP FREQUENCY é contraindicado nas seguintes condições:

- Recusa por parte do paciente,
- Anticoagulação terapêutica,
- Presença de infecção cutânea no local da punção,
- Aumento da pressão intracraniana,
- Hipovolemia.

RECLAMAÇÕES

Reclamações relacionadas a algum efeito adverso que afete a segurança do usuário, como produto não funcionando, ou dano, problemas graves ou mortes relacionadas a estes componentes o cirurgião responsável deverá comunicar este evento adverso ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária no sítio da ANVISA:

<https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/fiscalizacao-e-monitoramento/notificacoes>