

RP CONEXÕES RESTAURADORAS LTDA**CNPJ:** 08.539.206/0001-04**Endereço:** Rua Danilo Valbuza, 333 – Laranjeiras – Caieiras – SP – CEP: 07747-300

Indústria Brasileira

Responsável Técnico: Jailson Jose da Silva – CREA: 5062551972**Telefone SAC:** 11 4441-3854 / **E-mail:** engenharia@rpcomponentes.com.br**FINALIDADE E INDICAÇÃO DE USO**

O DISC RELIEVER RP, fabricado pela RP Componentes, consiste em um Kit Cirúrgico, invasivo cirurgicamente, de uso em curto prazo, utilizado com a finalidade de realizar descompressão da hérnia de disco intervertebral através de um método percutâneo (Discectomia Percutânea).

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO / MECANISMO DE AÇÃO

Cada modelo comercial do DISC RELIEVER RP é composto por uma Cânula de Punção, uma Cânula de Corte (Cervical ou Lombar), um Obturador (Cervical ou Lombar), um Trocater (Cervical ou Lombar), uma Trefina (Cervical ou Lombar), um Fio Guia e um Tubo Aspirador com Coletor. O DISC RELIEVER RP, através de seus componentes, permite o acesso através do uso de suas Cânulas de Punção e de Corte, permitindo o rompimento do Ânulo Fibroso através da utilização da Trefina.

O DISC RELIEVER RP realiza o corte, aspiração e remoção do conteúdo do núcleo pulposo do disco herniado.

Abaixo, tem-se o princípio de funcionamento dos componentes:

- Cânula de Punção: Função de perfuração e condução de instrumentais;
- Cânula de Corte (Cervical ou Lombar): Realiza o microdebridamento dos tecidos ósseos;
- Obturador (Cervical ou Lombar): Tem seu uso associado ao Trocater (Cervical ou Lombar), facilitando a introdução do mesmo guiado pelo Fio Guia;
- Trocater (Cervical ou Lombar): Viabiliza a inserção e remoção dos instrumentais;
- Trefina (Cervical ou Lombar): Função de corte, empregada no corte ou realização de orifício no ânulo fibroso;
- Fio Guia: Função de perfuração e condução de instrumentais;
- Tubo Aspirador com Coletor: Utilizado para a sucção e remoção dos tecidos removidos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cada modelo comercial do DISC RELIEVER RP é composto por: uma Cânula de Punção, uma Cânula de Corte (Cervical ou Lombar), um Obturador (Cervical ou Lombar), um Trocater (Cervical ou Lombar), uma Trefina (Cervical ou Lombar), um Fio Guia e um Tubo Aspirador com Coletor.

Abaixo, tem-se a composição de cada um dos componentes:

- Cânula de Punção: Aço Inox AISI 304, ABS, PVC, Polietileno;
- Cânula de Corte (Cervical ou Lombar): Carbono – EN ISO 7711-3 Aço inoxidável – EN10088-1 (1.4305), Aço Inoxidável – EN10088-1 (1.4301), Policarbonato – CAS NO. 25929-04- 8, Policarbonato – CAS NO. 24936-68- 3, Silicone Elastomérico – CAS NO. 556- 67-2;
- Obturador (Cervical ou Lombar): Poliacetal, Aço Inox AISI 304;

- Trocater (Cervical ou Lombar): Poliacetal, Aço Inox AISI 304;
- Trefina (Cervical ou Lombar): Poliacetal, Aço Inox AISI 304;
- Fio Guia: Nitinol – ASTM F2063;
- Tubo Aspirador com Coletor: Polietileno, ABS, Polipropileno, PVC transparente, Silicone Atóxico.

MODELOS E CÓDIGOS DE REFERÊNCIA

CÓDIGO	MODELO
RPDRCLIN200220	Composto por: Cânula de Corte: LIN Ø2,00 x 220 mm; Obturador (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Trocater (Cervical): Ø3,5 x 95 mm; Trefina (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m.
RPDRCDYO200220	Composto por: Cânula de Corte: DYO Ø2,00 x 220 mm; Obturador (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Trocater (Cervical): Ø3,5 x 95 mm; Trefina (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m.
RPDRCRAZ200220	Composto por: Cânula de Corte: RAZ Ø2,00 x 220 mm; Obturador (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Trocater (Cervical): Ø3,5 x 95 mm; Trefina (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m.
RPDRCSTR200220	Composto por: Cânula de Corte: STR Ø2,00 x 220 mm; Obturador (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Trocater (Cervical): Ø3,5 x 95 mm; Trefina (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m.
RPDRCSMI200220	Composto por: Cânula de Corte: SMI Ø2,00 x 220 mm; Obturador (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Trocater (Cervical): Ø3,5 x 95 mm; Trefina (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m.
RPDRCSET200220	Composto por: Cânula de Corte: SET Ø2,00 x 220 mm; Obturador (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Trocater (Cervical): Ø3,5 x 95 mm; Trefina (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m.
RPDRCLIN275220	Composto por: Cânula de Corte: LIN Ø2,75 x 220 mm; Obturador (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Trocater (Cervical): Ø3,5 x 95 mm; Trefina (Cervical): Ø2,8 x

	115 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m.
RPDRCDYO275220	Composto por: Cânula de Corte: LIN Ø2,75 x 220 mm; Obturador (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Trocater (Cervical): Ø3,5 x 95 mm; Trefina (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRCRAZ275220	Composto por: Cânula de Corte: RAZ Ø2,75 x 220 mm; Obturador (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Trocater (Cervical): Ø3,5 x 95 mm; Trefina (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRCSETR275220	Composto por: Cânula de Corte: STR Ø2,75 x 220 mm; Obturador (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Trocater (Cervical): Ø3,5 x 95 mm; Trefina (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRCSMI275220	Composto por: Cânula de Corte: SMI Ø2,75 x 220 mm; Obturador (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Trocater (Cervical): Ø3,5 x 95 mm; Trefina (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRCSET275220	Composto por: Cânula de Corte: SET Ø2,75 x 220 mm; Obturador (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Trocater (Cervical): Ø3,5 x 95 mm; Trefina (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRCLIN280220	Composto por: Cânula de Corte: LIN Ø2,80 x 220 mm; Obturador (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Trocater (Cervical): Ø3,5 x 95 mm; Trefina (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRCDYO280220	Composto por: Cânula de Corte: LIN Ø2,80 x 220 mm; Obturador (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Trocater (Cervical): Ø3,5 x 95 mm; Trefina (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRCRAZ280220	Composto por: Cânula de Corte: DYO Ø2,80 x 220 mm; Obturador (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Trocater (Cervical): Ø3,5 x 95 mm; Trefina

	(Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRCSETR280220	Composto por: Cânula de Corte: STR Ø2,80 x 220 mm; Obturador (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Trocater (Cervical): Ø3,5 x 95 mm; Trefina (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRCSMI280220	Composto por: Cânula de Corte: SMI Ø2,80 x 220 mm; Obturador (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Trocater (Cervical): Ø3,5 x 95 mm; Trefina (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRCSET280220	Composto por: Cânula de Corte: SET Ø2,80 x 220 mm; Obturador (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Trocater (Cervical): Ø3,5 x 95 mm; Trefina (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo aspirador com Coletor: 5 m
RPDRCLIN290220	Composto por: Cânula de Corte: LIN Ø2,90 x 220 mm; Obturador (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Trocater (Cervical): Ø3,5 x 95 mm; Trefina (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRCDYO290220	Composto por: Cânula de Corte: DYO Ø2,90 x 220 mm; Obturador (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Trocater (Cervical): Ø3,5 x 95 mm; Trefina (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRCRAZ290220	Composto por: Cânula de Corte: RAZ Ø2,90 x 220 mm; Obturador (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Trocater (Cervical): Ø3,5 x 95 mm; Trefina (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRCSETR290220	Composto por: Cânula de Corte: STR Ø2,90 x 220 mm; Obturador (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Trocater (Cervical): Ø3,5 x 95 mm; Trefina (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRCSMI290220	Composto por: Cânula de Corte: SMI Ø2,90 x 220 mm; Obturador (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Trocater (Cervical): Ø3,5 x 95 mm; Trefina (Cervical): Ø2,8 x

	115 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRCSET290220	Composto por: Cânula de Corte: SET Ø2,90 x 220 mm; Obturador (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Trocater (Cervical): Ø3,5 x 95 mm; Trefina (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRCLIN200284	Composto por: Cânula de Corte: LIN Ø2,00 x 284 mm; Obturador (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Trocater (Cervical): Ø3,5 x 95 mm; Trefina (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRCDYO200284	Composto por: Cânula de Corte: DYO Ø2,00 x 284 mm; Obturador (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Trocater (Cervical): Ø3,5 x 95 mm; Trefina (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRCRAZ200284	Composto por: Cânula de Corte: RAZ Ø2,00 x 284 mm; Obturador (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Trocater (Cervical): Ø3,5 x 95 mm; Trefina (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRCSETR200284	Composto por: Cânula de Corte: STR Ø2,00 x 284 mm; Obturador (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Trocater (Cervical): Ø3,5 x 95 mm; Trefina (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRCSMI200284	Composto por: Cânula de Corte: SMI Ø2,00 x 284 mm; Obturador (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Trocater (Cervical): Ø3,5 x 95 mm; Trefina (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRCSET200284	Composto por: Cânula de Corte: SET Ø2,00 x 284 mm; Obturador (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Trocater (Cervical): Ø3,5 x 95 mm; Trefina (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRCLIN275284	Composto por: Cânula de Corte: LIN Ø2,75 x 284 mm; Obturador (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Trocater (Cervical): Ø3,5 x 95 mm; Trefina (Cervical): Ø2,8 x

	115 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRCDYO275284	Composto por: Cânula de Corte: DYO Ø2,75 x 284 mm; Obturador (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Trocater (Cervical): Ø3,5 x 95 mm; Trefina (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRCRAZ275284	Composto por: Cânula de Corte: RAZ Ø2,75 x 284 mm; Obturador (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Trocater (Cervical): Ø3,5 x 95 mm; Trefina (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRCSETR275284	Composto por: Cânula de Corte: STR Ø2,75 x 284 mm; Obturador (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Trocater (Cervical): Ø3,5 x 95 mm; Trefina (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRCSMI275284	Composto por: Cânula de Corte: SMI Ø2,75 x 284 mm; Obturador (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Trocater (Cervical): Ø3,5 x 95 mm; Trefina (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRCSET275284	Composto por: Cânula de Corte: SET Ø2,75 x 284 mm; Obturador (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Trocater (Cervical): Ø3,5 x 95 mm; Trefina (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRCLIN280284	Composto por: Cânula de Corte: LIN Ø2,80 x 284 mm; Obturador (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Trocater (Cervical): Ø3,5 x 95 mm; Trefina (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRCDYO280284	Composto por: Cânula de Corte: DYO Ø2,80 x 284 mm; Obturador (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Trocater (Cervical): Ø3,5 x 95 mm; Trefina (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRCRAZ280284	Composto por: Cânula de Corte: RAZ Ø2,80 x 284 mm; Obturador (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Trocater (Cervical): Ø3,5 x 95 mm; Trefina (Cervical): Ø2,8 x

	115 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRCSETR280284	Composto por: Cânula de Corte: STR Ø2,80 x 284 mm; Obturador (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Trocater (Cervical): Ø3,5 x 95 mm; Trefina (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRCSMI280284	Composto por: Cânula de Corte: SMI Ø2,80 x 284 mm; Obturador (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Trocater (Cervical): Ø3,5 x 95 mm; Trefina (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRCSET280284	Composto por: Cânula de Corte: SET Ø2,80 x 284 mm; Obturador (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Trocater (Cervical): Ø3,5 x 95 mm; Trefina (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRCLIN290284	Composto por: Cânula de Corte: LIN Ø2,90 x 284 mm; Obturador (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Trocater (Cervical): Ø3,5 x 95 mm; Trefina (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRCDYO290284	Composto por: Cânula de Corte: DYO Ø2,90 x 284 mm; Obturador (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Trocater (Cervical): Ø3,5 x 95 mm; Trefina (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRCRAZ290284	Composto por: Cânula de Corte: RAZ Ø2,90 x 284 mm; Obturador (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Trocater (Cervical): Ø3,5 x 95 mm; Trefina (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRCSETR290284	Composto por: Cânula de Corte: STR Ø2,90 x 284 mm; Obturador (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Trocater (Cervical): Ø3,5 x 95 mm; Trefina (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRCSMI290284	Composto por: Cânula de Corte: SMI Ø2,90 x 284 mm; Obturador (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Trocater (Cervical): Ø3,5 x 95 mm; Trefina (Cervical): Ø2,8 x

	115 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRCSET290284	Composto por: Cânula de Corte: SET Ø2,90 x 284 mm; Obturador (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Trocater (Cervical): Ø3,5 x 95 mm; Trefina (Cervical): Ø2,8 x 115 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRLIN200220	Composto por: Cânula de Corte: LIN Ø2,00 x 220 mm; Obturador (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Trocater (Lombar): Ø3,5 x 145 mm; Trefina (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRLDYO200220	Composto por: Cânula de Corte: DYO Ø2,00 x 220 mm; Obturador (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Trocater (Lombar): Ø3,5 x 145 mm; Trefina (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRLRAZ200220	Composto por: Cânula de Corte: RAZ Ø2,00 x 220 mm; Obturador (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Trocater (Lombar): Ø3,5 x 145 mm; Trefina (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRLSETR200220	Composto por: Cânula de Corte: STR Ø2,00 x 220 mm; Obturador (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Trocater (Lombar): Ø3,5 x 145 mm; Trefina (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRLSMI200220	Composto por: Cânula de Corte: SMI Ø2,00 x 220 mm; Obturador (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Trocater (Lombar): Ø3,5 x 145 mm; Trefina (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRLSET200220	Composto por: Cânula de Corte: SET Ø2,00 x 220 mm; Obturador (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Trocater (Lombar): Ø3,5 x 145 mm; Trefina (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRLIN275220	Composto por: Cânula de Corte: LIN Ø2,75 x 220 mm; Obturador (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Trocater (Lombar): Ø3,5 x 145 mm; Trefina (Lombar): Ø2,8 x

	175 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRLDYO275220	Composto por: Cânula de Corte: DYO Ø2,75 x 220 mm; Obturador (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Trocater (Lombar): Ø3,5 x 145 mm; Trefina (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRLRAZ275220	Composto por: Cânula de Corte: RAZ Ø2,75 x 220 mm; Obturador (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Trocater (Lombar): Ø3,5 x 145 mm; Trefina (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRLSETR275220	Composto por: Cânula de Corte: STR Ø2,75 x 220 mm; Obturador (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Trocater (Lombar): Ø3,5 x 145 mm; Trefina (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRLSMI275220	Composto por: Cânula de Corte: SMI Ø2,75 x 220 mm; Obturador (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Trocater (Lombar): Ø3,5 x 145 mm; Trefina (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRLSET275220	Composto por: Cânula de Corte: SET Ø2,75 x 220 mm; Obturador (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Trocater (Lombar): Ø3,5 x 145 mm; Trefina (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRLLIN280220	Composto por: Cânula de Corte: LIN Ø2,80 x 220 mm; Obturador (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Trocater (Lombar): Ø3,5 x 145 mm; Trefina (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRLDYO280220	Composto por: Cânula de Corte: DYO Ø2,80 x 220 mm; Obturador (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Trocater (Lombar): Ø3,5 x 145 mm; Trefina (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRLRAZ280220	Composto por: Cânula de Corte: RAZ Ø2,80 x 220 mm; Obturador (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Trocater (Lombar): Ø3,5 x 145 mm; Trefina (Lombar): Ø2,8 x

	175 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRLSETR280220	Composto por: Cânula de Corte: STR Ø2,80 x 220 mm; Obturador (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Trocater (Lombar): Ø3,5 x 145 mm; Trefina (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRLSMI280220	Composto por: Cânula de Corte: SMI Ø2,80 x 220 mm; Obturador (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Trocater (Lombar): Ø3,5 x 145 mm; Trefina (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRLSET280220	Composto por: Cânula de Corte: SET Ø2,80 x 220 mm; Obturador (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Trocater (Lombar): Ø3,5 x 145 mm; Trefina (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRLLIN290220	Composto por: Cânula de Corte: LIN Ø2,90 x 220 mm; Obturador (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Trocater (Lombar): Ø3,5 x 145 mm; Trefina (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRLDYO290220	Composto por: Cânula de Corte: DYO Ø2,90 x 220 mm; Obturador (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Trocater (Lombar): Ø3,5 x 145 mm; Trefina (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRLRAZ290220	Composto por: Cânula de Corte: RAZ Ø2,90 x 220 mm; Obturador (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Trocater (Lombar): Ø3,5 x 145 mm; Trefina (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRLSETR290220	Composto por: Cânula de Corte: STR Ø2,90 x 220 mm; Obturador (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Trocater (Lombar): Ø3,5 x 145 mm; Trefina (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRLSMI290220	Composto por: Cânula de Corte: SMI Ø2,90 x 220 mm; Obturador (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Trocater (Lombar): Ø3,5 x 145 mm; Trefina (Lombar): Ø2,8 x

	175 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRLSET290220	Composto por: Cânula de Corte: SET Ø2,90 x 220 mm; Obturador (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Trocater (Lombar): Ø3,5 x 145 mm; Trefina (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRLIN200284	Composto por: Cânula de Corte: LIN Ø2,00 x 284 mm; Obturador (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Trocater (Lombar): Ø3,5 x 145 mm; Trefina (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRLDYO200284	Composto por: Cânula de Corte: DYO Ø2,00 x 284 mm; Obturador (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Trocater (Lombar): Ø3,5 x 145 mm; Trefina (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRLRAZ200284	Composto por: Cânula de Corte: RAZ Ø2,00 x 284 mm; Obturador (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Trocater (Lombar): Ø3,5 x 145 mm; Trefina (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRLSETR200284	Composto por: Cânula de Corte: STR Ø2,00 x 284 mm; Obturador (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Trocater (Lombar): Ø3,5 x 145 mm; Trefina (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRLSMI200284	Composto por: Cânula de Corte: SMI Ø2,00 x 284 mm; Obturador (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Trocater (Lombar): Ø3,5 x 145 mm; Trefina (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRLSET200284	Composto por: Cânula de Corte: SET Ø2,00 x 284 mm; Obturador (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Trocater (Lombar): Ø3,5 x 145 mm; Trefina (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRLIN275284	Composto por: Cânula de Corte: LIN Ø2,75 x 284 mm; Obturador (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Trocater (Lombar): Ø3,5 x 145 mm; Trefina (Lombar): Ø2,8 x

	175 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRLDYO275284	Composto por: Cânula de Corte: DYO Ø2,75 x 284 mm; Obturador (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Trocater (Lombar): Ø3,5 x 145 mm; Trefina (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRLRAZ275284	Composto por: Cânula de Corte: RAZ Ø2,75 x 284 mm; Obturador (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Trocater (Lombar): Ø3,5 x 145 mm; Trefina (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRLSETR275284	Composto por: Cânula de Corte: STR Ø2,75 x 284 mm; Obturador (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Trocater (Lombar): Ø3,5 x 145 mm; Trefina (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRLSMI275284	Composto por: Cânula de Corte: SMI Ø2,75 x 284 mm; Obturador (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Trocater (Lombar): Ø3,5 x 145 mm; Trefina (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRLSET275284	Composto por: Cânula de Corte: SET Ø2,75 x 284 mm; Obturador (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Trocater (Lombar): Ø3,5 x 145 mm; Trefina (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRLLIN280284	Composto por: Cânula de Corte: LIN Ø2,80 x 284 mm; Obturador (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Trocater (Lombar): Ø3,5 x 145 mm; Trefina (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRLDYO280284	Composto por: Cânula de Corte: DYO Ø2,80 x 284 mm; Obturador (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Trocater (Lombar): Ø3,5 x 145 mm; Trefina (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRLRAZ280284	Composto por: Cânula de Corte: RAZ Ø2,80 x 284 mm; Obturador (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Trocater (Lombar): Ø3,5 x 145 mm; Trefina (Lombar): Ø2,8 x

	175 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRLSETR280284	Composto por: Cânula de Corte: STR Ø2,80 x 284 mm; Obturador (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Trocater (Lombar): Ø3,5 x 145 mm; Trefina (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRLSMI280284	Composto por: Cânula de Corte: SMI Ø2,80 x 284 mm; Obturador (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Trocater (Lombar): Ø3,5 x 145 mm; Trefina (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRLSET280284	Composto por: Cânula de Corte: SET Ø2,80 x 284 mm; Obturador (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Trocater (Lombar): Ø3,5 x 145 mm; Trefina (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRLLIN290284	Composto por: Cânula de Corte: LIN Ø2,90 x 284 mm; Obturador (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Trocater (Lombar): Ø3,5 x 145 mm; Trefina (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRLDYO290284	Composto por: Cânula de Corte: DYO Ø2,90 x 284 mm; Obturador (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Trocater (Lombar): Ø3,5 x 145 mm; Trefina (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRLRAZ290284	Composto por: Cânula de Corte: RAZ Ø2,90 x 284 mm; Obturador (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Trocater (Lombar): Ø3,5 x 145 mm; Trefina (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRLSETR290284	Composto por: Cânula de Corte: STR Ø2,90 x 284 mm; Obturador (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Trocater (Lombar): Ø3,5 x 145 mm; Trefina (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRLSMI290284	Composto por: Cânula de Corte: SMI Ø2,90 x 284 mm; Obturador (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Trocater (Lombar): Ø3,5 x 145 mm; Trefina (Lombar): Ø2,8 x

	175 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m
RPDRLSET290284	Composto por: Cânula de Corte: SET Ø2,90 x 284 mm; Obturador (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Trocater (Lombar): Ø3,5 x 145 mm; Trefina (Lombar): Ø2,8 x 175 mm; Cânula de punção: Ø14 Gauge x 220 mm; Fio Guia: Ø1,0 x 350 mm; Tubo Aspirador com Coletor: 5 m

ESTERILIZAÇÃO

Esterilizado pelo processo de óxido de etileno.

Validade de 3 anos a partir da data de esterilização.

CONDIÇÕES PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

O DISC RELIEVER RP deve ser armazenado em local ventilado e seco. O local de armazenamento deve ser afastado de janelas, expostos à luz solar ou próximo à aquecedores.

Parâmetros indicados pelo fabricante:

- A. Faixa de temperatura ambiental: 15 °C ~ 30 °C
- B. Umidade relativa: ≤80%

Por fim, o DISC RELIEVER RP deve ser armazenado e transportado sob condições as quais ele esteja protegido de umidade, sujidades e contato com substâncias corrosivas, tóxicas, inflamáveis ou explosivas.

Não colocar objetos pesados sobre a embalagem; evitar bater a embalagem ou amassar; manter o produto em local seco e ao abrigo do sol.

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO

O DISC RELIEVER RP só deve ser utilizado por profissionais capacitados.

Manter o produto em sua embalagem original até o momento do uso.

Evite queda, torção, esmagamento, impacto ou qualquer ação que venha danificar o produto, pois pode comprometer seu funcionamento.

Antes de utilizar o produto, a embalagem deve ser inspecionada quanto a sua integridade para garantir que o mesmo não foi comprometido. Não utilize o material caso a embalagem estiver danificada/violada.

Após a sua utilização, descartar o produto em lixo hospitalar, respeitando as leis vigentes para descarte de resíduos sólidos.

ADVERTÊNCIAS / PRECAUÇÕES

- O DISC RELIEVER RP é destinado para USO ÚNICO, NÃO REUTILIZAR e NÃO REPROCESSAR.
- O DISC RELIEVER RP só pode ser usado de acordo com o seu propósito.



- O DISC RELIEVER RP usado deve ser descartado de acordo com a legislação vigente local.
- Não utilize o produto fora da data de validade, sempre verifique se a indicação de esterilização está correta.
- O produto só deve ser utilizado por profissionais médicos qualificados, que possuam o conhecimento e a experiência necessários para a devida utilização do produto, conhecimento de manuseio de produtos estéreis e, principalmente, da importância de se manter um ambiente totalmente estéril nas salas de cirurgia, onde o cuidado e precaução com cada detalhe são fundamentais para que não haja riscos de contaminação.
- O usuário, antes de utilizar o produto, deve ler atentamente as instruções de uso que o auxiliarão no uso correto e seguro, além de proteger contra possíveis riscos.
- O produto deve ser transportado e acondicionado sempre protegido contra todo tipo de umidade, sujeira e contato com substâncias inflamáveis, corrosivas, tóxicas ou explosivas.
- Verifique a integridade da embalagem antes de utilizar o produto, em caso de violação, NÃO UTILIZE, pois a garantia de sua esterilidade estará comprometida.